



Porta Bastone per Veloped – Istruzioni di montaggio

Porta-canna in 2 pezzi per il Veloped che funziona anche come cinghia di sicurezza quando il Veloped è piegato per il trasporto o lo stoccaggio. Il porta-canna si adatta a tutti i modelli Veloped.

Scansiona il codice QR con il tuo smartphone o dispositivo per visualizzare le istruzioni video.

① Fissare il supporto posteriore.

Avvolgere il supporto posteriore per il bastone intorno alla parte superiore del tubo verticale posteriore del telaio, appena sotto il rilascio rapido per la regolazione dell'altezza.

② Tirare bene la cinghia.

È possibile utilizzare la fascetta porta bastone per fissare il telaio del Veloped quando è piegato per essere trasportato o per essere riposto.

③ Regolare l'anello posteriore.

La dimensione dell'occhiello posteriore può essere regolata allentando la chiusura in velcro. Potrebbe essere necessario schiacciare delicatamente l'occhiello per ottenere una forma arrotondata/circolare.

④ Fissare il supporto anteriore.

Avvolgere il supporto anteriore per il bastone attorno al tubo superiore del telaio, appena dopo l'attacco della guida del cestino. Assicurarsi che la striscia anti scivolo sia rivolta verso il tubo del telaio.

⑤ Regola il passante anteriore.

La dimensione dell'occhiello anteriore può essere regolata allentando la chiusura in velcro. Potrebbe essere necessario schiacciare delicatamente l'occhiello per ottenere una forma arrotondata/circolare.

⑥ Attacca il bastone da passeggio.

Fissare il bastone da passeggio infilandolo prima attraverso l'occhiello del supporto posteriore e poi attraverso quello anteriore.

⑦ Fissare il telaio.

Puoi utilizzare la cinghia porta-bastone per fissare il telaio quando è piegato, durante il trasporto o lo stoccaggio del tuo Veloped.