

Manuale: Lucchetto con cavo Trionic



1 Individuare la vite sulla staffa.



2 Svitare la vite con una chiave a brugola da 4 mm.



3 Estrarre l'estremità della cinghia dalla staffa.




4 Avvolgere la cinghia attorno al tubo verticale posteriore del telaio del Veloped (sul Walker, il tubo semi-verticale del telaio).



5 Inserire l'estremità della cinghia nella staffa.



6 Stringere la vite/cinghia con la chiave a brugola da 4 mm fino a quando la cinghia non è stretta.

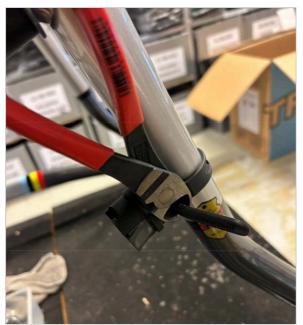

7 Tagliare la lunghezza eccessiva della cinghia con un tronchese o un coltello.



8 La foto mostra il corretto fissaggio della staffa.



9 Fissare il lucchetto per cavo alla staffa dall'alto, spingere il lucchetto per cavo verso il basso finché non scatta in posizione nella staffa. lucchetto dal supporto.



10 Per staccare il lucchetto dal supporto, premere i due pulsanti grigi e rimuovere il