



Manuale: Lucchetto con cavo Trionic



① Individuare la vite sulla staffa.



② Svitare la vite con una chiave a brugola da 4 mm.



③ Estrarre l'estremità della cinghia dalla staffa.



④ Avvolgere la cinghia attorno al tubo verticale posteriore del telaio del Veloped (sul Walker, il tubo semi-verticale del telaio).




⑤ Inserire l'estremità della cinghia nella staffa.



⑥ Stringere la vite/cinghia con la chiave a brugola da 4 mm fino a quando la cinghia non è stretta.



⑦ Tagliare la lunghezza eccessiva della cinghia con un tronchese o un coltello.

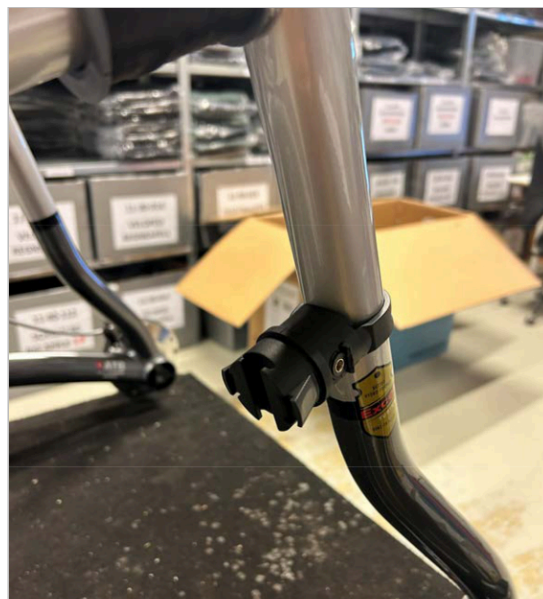

⑧ La foto mostra il corretto fissaggio della staffa.



⑨ Fissare il lucchetto per cavo alla staffa dall'alto, spingere il lucchetto per cavo verso il basso finché non scatta in posizione nella staffa.



⑩ Per staccare il lucchetto dal supporto, premere i due pulsanti grigi e rimuovere il lucchetto dal supporto.