



Grazie per aver scelto la luce anteriore a LED Trionic da 1000 lumen.

Questo manuale mostra sia come fissare il supporto della luce e la luce su un Walker (colonna di sinistra in basso) sia come fissarli su un Veloped (colonna di destra in basso).

Nella foto a sinistra, **A** mostra le parti di fissaggio del supporto per un Walker (2 viti + 2 rondelle). **B** mostra le parti di fissaggio del supporto per un Veloped (1 vite + 1 dado zigrinato + 1 dado).

Fissaggio del portalamпада

Istruzioni per un deambulatore

- A1.** Sulla parte superiore del tubo semi-verticale nero, individua le due viti che fissano il tubo dell'impugnatura, situato davanti alla leva del freno.
- A2.** Allentare entrambe le viti con la chiave a brugola da 5 mm fornita insieme alla luce LED.
- A3.** Rimuovere le due viti dal morsetto dell'impugnatura.
- A4.** Posizionare il portalamпада sopra il morsetto dell'impugnatura, con l'attacco circolare e scanalato rivolto in avanti e verso l'alto. Inserire le due viti con le rondelle nei fori del morsetto.
- A5.** Stringere le due viti con la chiave a brugola da 5 mm. **NOTA:** è importante stringere bene le viti perché fissano il tubo dell'impugnatura con la sua impugnatura in gomma e la leva del freno.

Istruzioni per un Trionic Veloped

- A1.** Individuare la vite nella cerniera centrale pieghevole della barra di impugnatura a U del Veloped. Svitare la vite con la chiave a brugola da 4 mm in dotazione e rimuoverla.
- B2.** Sostituisci la vecchia vite con quella più lunga inclusa nella confezione della luce a LED. Fissa la vite più lunga alla cerniera e stringila con la chiave a brugola da 4 mm.
- B3.** Fissare l'estremità corta angolata del supporto della lampada all'estremità inferiore della vite, sul lato inferiore della barra di presa a U. Il supporto deve essere rivolto verso il basso. Fissare il supporto con una rondella e il dado zigrinato, stringendo con le dita.
- B4.** Per un fissaggio più sicuro del supporto, evitando che si ruoti inavvertitamente di lato, sostituire il dado zigrinato con il dado in acciaio inossidabile incluso e serrarlo con una chiave inglese da 10 mm.
- B5.** Questa foto mostra il portalamпада correttamente fissato.

Fissaggio della luce LED al supporto

Istruzioni per un deambulatorio

A6. Identificare l'estremità anteriore circolare del portalamпада, con due fessure per il fissaggio della lampada.

A7. Spingere la staffa scanalata della luce nelle fessure del supporto e assicurarsi che siano allineate. Guardando nella direzione di marcia del Walker, inserire il dado ad alette incluso da sinistra e serrarlo.


Istruzioni per un Trionic Veloped

B6. Individuare la vite nella cerniera centrale pieghevole della barra di impugnatura a U del Veloped. Svitare la vite con la chiave a brugola da 4 mm in dotazione e rimuoverla.

B7. Identificare l'estremità anteriore circolare del portalamпада, con due fessure per il fissaggio della lampada.

Istruzioni per l'uso

Panoramica

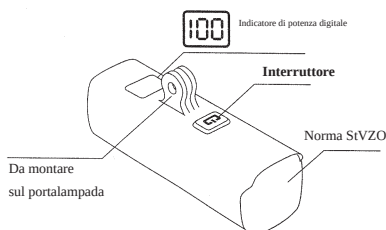

Come far funzionare la luce

Tieni premuto l'interruttore per 2 secondi per accendere o spegnere la luce. Fai clic una volta per scorrere le modalità e fai doppio clic per abilitare la modalità ultra-luminosa (1000 lm).

Attenzione

È normale che la batteria raggiunga temperature elevate (fino a 40 °C) durante la carica a causa di reazioni chimiche al suo interno. La batteria potrebbe anche surriscaldarsi se non viene completamente scaricata prima della ricarica. Diversi fattori possono influenzare la durata della batteria, tra cui il tipo di cella, lo stress da utilizzo, la routine di manutenzione, la temperatura e il numero di cicli di carica. In genere, una maggiore capacità della batteria si traduce in una maggiore autonomia. La capacità della batteria può ridursi a circa l'80% della sua capacità originale dopo 300-500 cicli di carica/scarica. Con la dovuta cura, la batteria può avere una durata fino a 3 anni. La resistenza all'acqua è valida solo per l'acqua piovana. Non immergere la batteria o l'intera lampada in acqua durante la pulizia. Pulire la lampada con un panno morbido e umido quando necessario.

Prestazioni della batteria

Le prestazioni della batteria sono significativamente influenzate dalle variazioni di temperatura: -Bassa temperatura: a 0 °C, la capacità diminuisce del 5-10%, riducendo l'autonomia del 50%. A -20 °C, la capacità diminuisce del 30%, riducendo potenzialmente l'autonomia del 70%. Le prestazioni tornano alla normalità quando la temperatura sale a 20 °C. -Tasso di autoscarica: a temperatura ambiente, la batteria perde circa l'1% della sua capacità al giorno. Se conservata a 40 °C, il tasso di autoscarica aumenta, portando a una perdita di circa il 5% della capacità al giorno. Per mantenere prestazioni ottimali della batteria, evitare di esporla a temperature estreme e conservarla in un luogo fresco e asciutto. Se non si utilizza la batteria per un lungo periodo, assicurarsi di ricaricarla ogni 3 mesi.

MODALITÀ SICURA

Quando la batteria è scarica, la luce passa automaticamente alla modalità di sicurezza abbagliante da 50 lumen, garantendo altri 30 minuti di funzionamento.

Il pacchetto contiene

Ricarica e Powerbank