

Portabottiglie Veloped – Istruzioni di montaggio


Portaborraccia universale per Veloped e deambulatore, fissato al telaio del Veloped tramite un morsetto avvitato. Colore: nero.

La fornitura comprende un portaborraccia, un supporto a morsetto e una chiave a brugola da 3 mm.


Scansiona il codice QR con il tuo smartphone o dispositivo per visualizzare le istruzioni video.



① Svitare e rimuovere una vite dal supporto del morsetto.

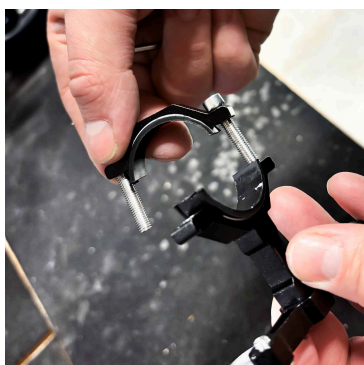

② Svitare l'altra vite il più possibile, ma lasciarla attaccata al morsetto.

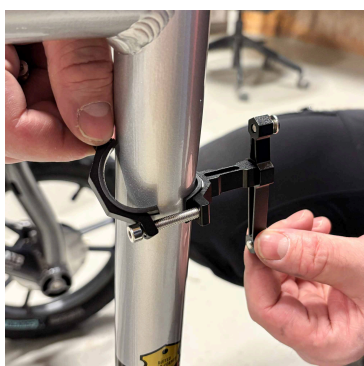

③ Ruotare una metà del morsetto di 90 gradi per facilitare il montaggio del morsetto sul telaio Veloped. Con il braccio corto del portaborraccia rivolto verso l'alto, fissare il morsetto alla parte verticale del tubo posteriore destro o sinistro del telaio del Veloped. Quando si avvita il morsetto al telaio del Veloped, assicurarsi che entrambe le viti siano serrate in modo uniforme.



④ Allentare le due viti sulla staffa di fissaggio e avvitare il portaborraccia, preferibilmente con l'apertura laterale del portaborraccia rivolta verso l'esterno.



⑤ I portaborraccia Veloped sono ora montati correttamente e pronti per l'uso. Ben fatto.