




Porta bastone Walker – istruzioni di montaggio

Supporto per bastone in 2 pezzi, da fissare al manico e al telaio del deambulatore. La parte superiore è dotata di un'intelligente funzione di aggancio rapido, che permette di agganciare e sganciare il bastone rapidamente. Compatibile con i deambulatori Walker da 9, 12 e 14 pollici.

Scansiona il codice QR con il tuo smartphone o dispositivo per visualizzare le istruzioni video.

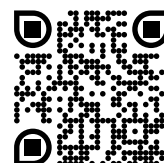

- ① Ruotare il supporto superiore in modo che il logo sia rivolto verso l'alto.



- ② Agganciare il supporto alla parte superiore del tubo dell'impugnatura.

Agganciare il supporto alla parte superiore del tubo dell'impugnatura e avvitare in posizione con un cacciavite a croce.




- ③ Se si collegano sia il portacanna che lo schienale

Nota: Regolare la posizione della leva del freno in modo che ci sia spazio per il porta-bastone superiore accanto allo schienale. Potrebbe essere necessario inclinare il porta-bastone verso l'esterno di circa 30 gradi per adattarlo e lo schienale al deambulatore.




④ Fissare il supporto inferiore al telaio

Per il montaggio destro/sinistro, ruotare il supporto inferiore in modo da poter raggiungere la vite dall'esterno del telaio. Per fissare il supporto inferiore al telaio, avvolgere la cinghia attorno al tubo del telaio e inserirla nel foro del supporto.

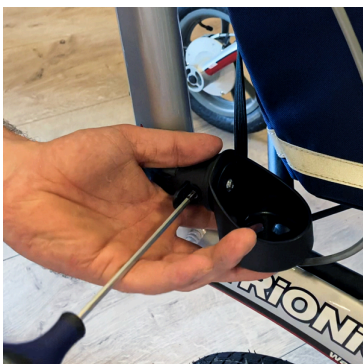

⑤ Stringere la vite/cinghia

Stringere la vite/cinghia utilizzando una chiave a brugola da 4 mm.

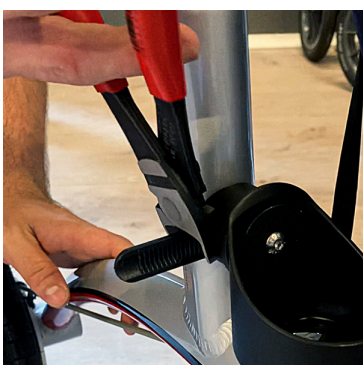

⑥ Tagliare la lunghezza eccessiva della cinghia

Tagliare la lunghezza eccessiva della cinghia con un tronchese.



⑦ Pronto per l'uso