



Deambulatore con schienale Trionic - Istruzioni di montaggio

Lo schienale ergonomico e imbottito, realizzato in poliestere 600D idrorepellente e resistente, si adatta ai rollator Walker 9er, 12er e 14er. Offre un supporto comodo e sicuro quando si è seduti. La lunghezza e la profondità dello schienale sono regolabili.

Lo schienale è disponibile in tre diverse lunghezze.

① Svitare.

Rimuovere le viti e i dadi dai due morsetti.

② Fissare lo schienale.

Aprire leggermente i morsetti e fissarli ai tubi dell'impugnatura.

IMPORTANTE: Assicurarsi che il logotipo "TRiONiC" sia posizionato correttamente, poiché lo schienale è angolato.

③ Fino in cima.

Spingere i due morsetti verso l'alto. È possibile allentare la vite sulla leva del freno per spostarla leggermente all'indietro.

④ fissare lo schienale.

Con una chiave a brugola da 4 mm, fissare entrambi i morsetti con le viti e i dadi. Le cinghie dello schienale devono essere rivolte in avanti nel punto di attacco.

⑤ Questa foto mostra l'assemblaggio corretto.

Prima di aprire il deambulatore.

Per ripiegare il deambulatore, inclinare lo schienale verso l'alto.

Se necessario.

Se lo schienale è troppo corto/troppo lungo, è possibile regolarne la lunghezza. Rimuovere le due viti e i dadi, quindi rimontare lo schienale.