



## **Borsa da trasporto Walker – Istruzioni per l'imballaggio**


La borsa da trasporto Walker è composta da una borsa da trasporto principale e da una borsa più piccola per il trasporto/stoccaggio. La borsa da trasporto è adatta a tutti i modelli Walker.

La borsa da trasporto può essere usata con tutti i modelli Walker.




### ① Aprire la borsa principale

Aprire la cerniera della custodia ed estrarre la borsa di trasporto principale.

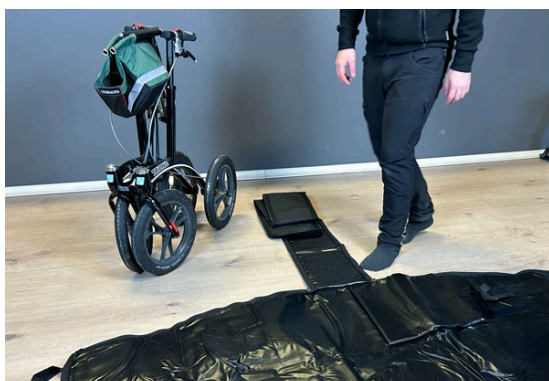


### ② Distribuire il sacco principale.

Aprire la cerniera della borsa principale per tutta la sua lunghezza e dispiegarla sul pavimento.

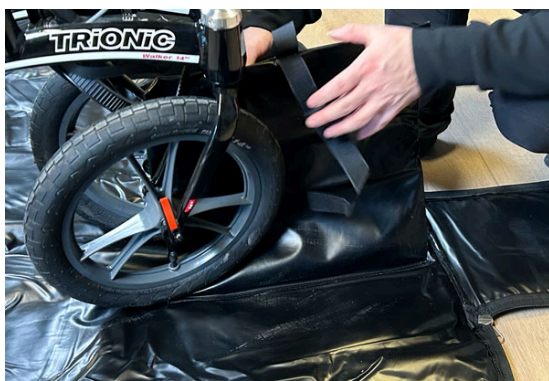

### ③ Posizionare il deambulatore sulla borsa.


Posizionare il Walker sulla sezione centrale della borsa di trasporto principale. La borsa principale è dotata di un rivestimento di protezione integrato, imbottito e dotato di una cinghia in velcro. Tirare verso l'alto il rivestimento di protezione e posizionarlo tra le forcelle delle ruote anteriori per proteggere la vernice.

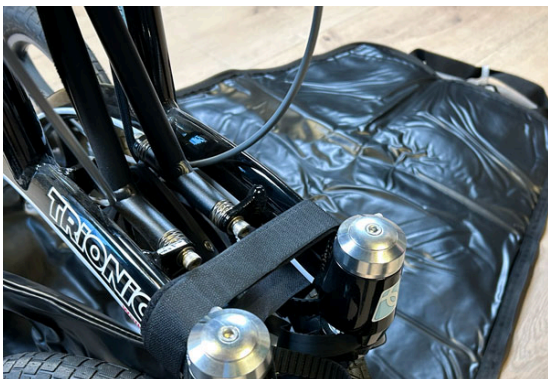

④ Fissare il telaio ripiegato con la cinghia in velcro integrata.



⑤ Ripiegare il lembo centrale sopra il Walker.

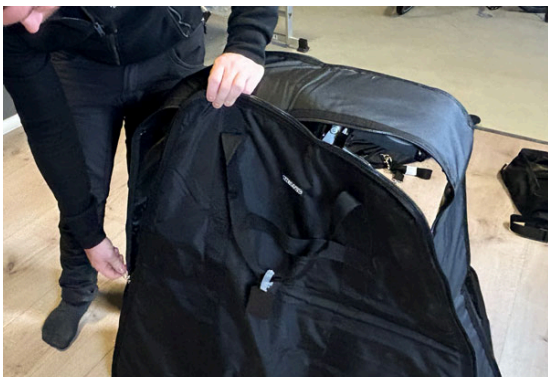

⑥ Sollevare le falde laterali e chiudere la cerniera principale.



⑦ Questa foto mostra il Walker correttamente imballato.

## Istruzioni per l'imballaggio



Scansiona il codice QR con il tuo smartphone o dispositivo per visualizzare le istruzioni video.